



BioBank

geninova



LAGRING AV BIOLOGISK MATERIALE

(BRUK BLOKKBOKSTAVER)

BRUK BLOKKBOKSTAVER

Dato for prøveuttak: / - 2015 Dato for innsending: / - 2015
Eier:
Adresse:
Telefon: Mobil:
E-post: @

Prosjekt "Fra fenotype til genotype" - Kostnadsfri deltakelse for utvalgte hunder/ hundeeiere

Table with columns: Navn, Microchip-ID, Føde-land, Født. Rows for Avkom, Rase, Far, Mor.

Oppdraget gjelder (sett kryss):

- A: Innsening av svaberprøve til DNA-ekstraksjon og lagring for senere bruk
1) Prøven tilhører hundeeier i hele hundens levetid.
2) Eier tillater at deler av prøven anvendes til testing og forskningsformål.
B: Genotyping
C: Slektskapskontroll
E: Ettersending av ny/manglede prøve

Korrekt identite bekreftes av representant fra Norske Elghundklubbens Forbund

Sign. eier: _____

Sign. NEKF: _____

Skjemaet sendes sammen med svaberprøven til:

BioBank AS
Holsetgata 22
N-2317 Hamar

Ved spørsmål, ring BioBank AS på tlf: 62 50 99 20 eller E-post til: post@biobank.no

PRØVENE VIL IKKE BLI EKSTRAHERET OG LAGRET OM DETTE SKJEMET IKKE MEDFØLGER.

FOR BIOBANK AS

Table with 3 columns: Description, checkboxes, Date/Signature.

VEILEDNING

Prøveuttak med Performagene (Oral) (PG-100)



Ta ut svaberen av emballasjen, men la den sitte fast øverst på røret **uten å sku av korken**.

Hold i røret og før svaberen med tuppen først inn ved kinnposen i hundens munn, slik vist på figuren.

Samle spytt i **30 sekunder** ved å **gni svaberen fram og tilbake langs slimhinnen** samtidig som du samler opp spytt f eks fra kinnposen eller på siden under tungen.




Hold røret oppreist og skru av korken fra røret.



Plasser svaberen med vattenden ned i røret.

Skru på korken tett for å hindre at væsken/ bufferløsningen lekker under transport.

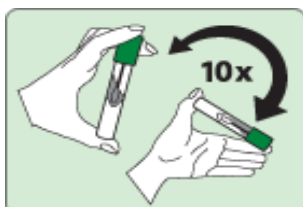

Vend røret kraftig 10 ganger for å blande prøven grundig i bufferen.



Skriv til sist tydelig dyret **identifikasjonsnummer** på det hvite feltet på etiketten på røret, bruk en tusj penn eller en kulepenn.