

# Prøvetakingsinstruks for dopingkontroll

Revidert: 2019-03-26

## Blodprøver

### Medvirkning fra hestens representant


1. Før blodprøver tas ut skal det settes fram 3 uåpnede, forseglede prøve-takingssett.

La hestens representant velge ut én pakke som åpnes av dopingkontrolløren under påsyn av hestens representant og benytt denne til den videre prøvetakingen.



2. Dernext skal det tas fram en forseglet pose med plasthansker.

Denne skal åpnes i påsyn av hestens representant før selve prøvetakingen begynner.

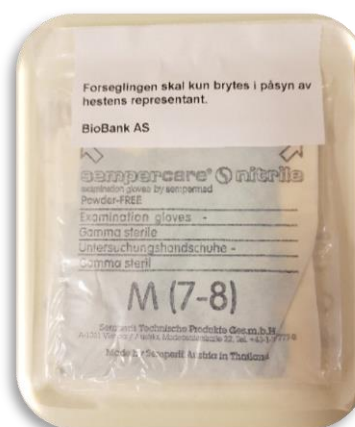

### Generelt om prøvetakingen

Utstyret som brukes skal alltid være fra uåpnede prøvetakingssett, jfr. punktene over.



### Forberedelse før prøvetakingen

3. Ta fram den hvite forsiden av prøvetakingsprotokollen med forseglingsetiketter.

4. Fyll ut «Protokoll for uttak av dopingprøver av hest». Protokollen består av fire ark med gjennomslag; bruk et hardt underlag slik at teksten er lesbar også på det siste arket. (Dersom det er mer praktisk kan protokollen også fylles ut *etter* prøvetakingen).
5. Ta på engangshansker.

## Prøvetaking

6. Ta blodprøver av hesten; fyll fem fulle (1 cm fra korken) gel-heparinrør 10 ml, grønn gul kork.

## Merking og forsegling av blodprøverørene

7. **Merk** alle blodprøverørene med strekkodeetiketter.

Etiketten skal plasseres slik at det trykte prøvenummeret kommer på den ene siden av røret, fortsetter med det grønne eller gule feltet over korken og festes på den andre siden av røret med strekkoden.

Hvis dette gjøres korrekt vil det bli en ubrutt forsegling over hele korken.

Gel-heparinrøret merket med den gule etiketten er B-prøven.



8. Få hestens representant til å kontrollere at merkingen av blodprøverørene stemmer overens med merkingen av «Protokoll for uttak av dopingprøver av hest» (samme prøvenummer) samt at opplysninger om hest og trener stemmer. Gå gjennom informasjonen i protokollen med hestens representant før denne signerer.

**OBS!** Hvis signaturen er utydelig bør navnes gjentas med blokkbokstaver.

I noen tilfeller ønsker hestens representant å forlate dopingkontrollen før hesten er ferdig.

Protokollen skal da signeres av hestens representant før personen forlater området. Årsaken til at hestens representant ønsket å forlate dopingkontrollen, samt tidspunkt for dette skal også noteres på protokollen

## Pakking av blodprøverørerne

9. Pakk alle blodprøverørerne i isoporesken (den gule B-prøven på skrå i bunn, de fire A-prøvene i de fire fordypningene i esken).



## Merking og forsegling av isoporesken

10. Lukk isoporesken tett og lim en etikett (strekkode og prøvenummer) på alle fire sider av esken i nærvær av hestens representant.



11. Protokoll for uttak av dopingprøver av hest er utarbeidet av Det Norske Travselskap i samarbeid med BioBank.

Kontroller at alle punkter i protokollen er riktig utfyllt og at den er signert.

1. Prøvene og de to første arkene (original og én kopi) sendes til BioBank AS.
2. Det tredje eksemplaret beholdes av stevneveterinæren sammen med kopi av helsekort.
3. Det fjerde eksemplaret gis til hestens representant/ trener.

12. Pakk isoporesken sammen med de to første arkene av protokollen i den medsendte sikkerhetsplastposen. Brett arkene slik at hestens id *ikke* er synlig i pakken.

13. Lukk sikkerhetsplastposen med klistreremsen ved åpningen. Forsegle deretter limingen på sikkerhetsposen med den siste etiketten fra følgeskjemaet.



## Forsendelse

14. Etter at punktene 1 til 13 er utført legges forpakningen i et låsbart kjøleskap eller tilsvarende fram til forsendelse.

15. Prøvene skal sendes i tilpasset hvit pappkartong så fort som mulig til:

**BioBank AS**  
**Holsetgata 22**  
**2317 Hamar**

Inntil tre esker passer i medsendt kartong. Flere enn én kartong kan buntet til ett kolli før forsendelse, bruk tape.

Sett på medsendt adresselapp for returforsendelse utvendig på esken.

16. For sporing av sendingene skal det for hver forsendelse sendes en melding til [post@biobank.no](mailto:post@biobank.no). En slik melding kan sendes på tre ulike måter:

16A. Bruk av e-post uten vedlegg:

Send e-postmelding med disse opplysningene

- ✓ Navn på bane
- ✓ Antall prøver
- ✓ Dato for forsendelse
- ✓ Forsendelsens sporingsnummer

16B. Bruk av e-post med vedlegg:

Send e-postmelding med følgende foto som vedlegg:

- 1) Klargjør pakken for sending (ett kolli) og sett på returetikett adressert til BioBank
- 2) Skriv inn i merknadsfeltet 'Transport instructions' antall prøver og dato for sending
- 3) Ta foto av returetiketten med en smarttelefon og påse at disse tre elementene er godt leselige

*Få med navn på travbanen*

*Sporingsnumrene må være synlige*

*Skriv inn antall prøver og dato for sending*



16C. Bruk av MMS bilde-melding:

Send MMS-melding med foto slik vist over, bruk også her [post@biobank.no](mailto:post@biobank.no) som adresse (ikke noe mobilnummer).